

Údržba ochranej masky Take Cair FFP3

- údržba rúšok pri mechanickom znečistení je vykonávaná prepláchnutím vlažnou vodou za použitia dezinfekčného mydla/mydla na pranie,
- použitie pracích práškov sa neodporúča vzhľadom na abrazívnosť častíc pracích práškov,
- je doporučované 1x denne obe strany rúška nastriekať dezinfekčným prípravkom,
- na plochy s obsahom minimálne 70% alkoholu a bez zahusťovadiel (napr. Izopropylalkohol),
- počkať minimálne 30 minút na odparenie alkoholovej zložky,
- maska je následne opäť pripravená na nosenie,
- životnosť ochranej masky je v uzatvorenom obale min. 6 rokov,
- v prípade zanedbania čistenia a dezinfekcie sa použiteľnosť rúška skracuje.